

TMT Extension チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・送気以外の目的で使用しないこと。
- ・本品は一回限り使用の Disposable 品なので、再使用しないこと。
- ・火気のある場所で使用しないこと。
- ・当社が指定した機器以外を接続しないこと。


【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品の構成部品は、以下のとおりである。

- (1) 送気延長チューブ
- (2) 付属品 (ロータリーコネクタ)

- ・送気延長チューブ

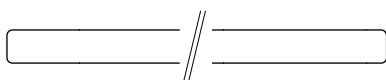

- ・ロータリーコネクタ



2. 寸法等

送気延長チューブ : 100 m (最大)
ロータリーコネクタ : 65 mm (最大)

【使用目的・効能又は効果】

送気装置と他の器具との接続に用いる柔軟性のあるチューブである。

【品目仕様等】

- ・送気延長チューブを 180 度曲げ 30 分固定した後、開放したとき、復元すること。
- ・送気延長チューブ内に異物が付着していないこと。
- ・送気延長チューブ及びロータリーコネクタに折れ曲がり、傷、割れがないこと。
- ・ロータリーコネクタが回転すること。

【操作方法又は使用方法】

1. 送気延長チューブの適切なサイズを選択する。
2. 送気延長チューブの一方を送気装置等に緩み無くしっかりと接続する。
3. 送気延長チューブの一方をロータリーコネクタに緩み無くしっかりと接続する。

【使用上の注意】

重要な基本的な注意

- ・チューブが途中で折れ、ねじれ、潰れ等していないことを確認すること。
- ・一患者専用とし、再使用しないこと。
- ・使用期限に留意し、使用期限を過ぎたものは使用しないこと。
- ・本品に破損、閉塞、異物が無いことを確認すること。
- ・本品を使用中は火気厳禁を順守し、火気の近くでは使用しないこと。[タバコは吸わないこと]。
- ・長期間使用する際は、患者の分泌液等による閉塞がないかを定期的に確認すること。
- ・医薬品(目薬等)、化粧品、アルコール等を接触させないこと [変色、変質、劣化の恐れ]。本品に変質等があった場合は、速やかに新しいものと交換すること。
- ・本品を接続又は取り外す場合は、無理な力を入れないこと。
- ・当社が指定した機器以外には接続しないこと。
- ・ロータリーコネクタのコネクタの詳細な寸法については、当社までお問い合わせください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 使用・保管環境

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ・傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2. 有効期間・使用期限

- ・製造日より3年(自己認証による)

【包装】

TM-10 : 10 袋 (10m /1 袋) /箱

TM-100 : 100m /1 袋 /箱

ロータリーコネクタ RC-55SM : 10 個 /1 袋

ロータリーコネクタ RC-55MM : 10 個 /1 袋

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売者 : 株式会社ティエムトレーディング

住 所 : 埼玉県朝霞市根岸台七丁目3番32号

・お客様窓口

電 話 : 048-468-2560

平日 9 時 ~ 17 時

製造業者 : NAN HAI FOSHANCITY FENG HUA MEDICAL
APPLIANCE CO.,LTD

国 名 : 中華人民共和国